


SINGLE Lutein Blue


Colorante intraocular para la tinción de la MLI



SINGLE LUTEIN
BLUETM

DESCIENDE A LA RETINA, SIN DISPERSIÓN EN TODO EL OJO

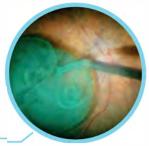

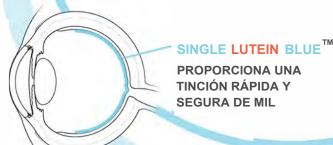

DESCRICPCIÓN DEL PRODUCTO

SINGLE Lutein Blue

JERINGA DE CRISTAL ESTERIL: 0,50ML 5 UNIDADES POR CAJA

COMPOSICIÓN

Cada jeringa de 0,5ml contiene: Luteína soluble 2%; PBB™ 0,05%; Azul Tripán 0,15%. Vehículo biológicamente compatible inactivo.

ALTA PUREZA Y SEGURIDAD **DOUBLE LUTEIN BLUE™** contiene PBB ™ altamente purificado (hasta un 99.6%) y Luteina extraída de la flor de Marigold. La Luteína es un compuesto 100% natural y está clasificado por la FDA como GRAS.

EFICACIA Y PROTECCIÓN


Los estudios clínicos, demostraron que los colorantes intraoculares a base de Luteína, pueden proteger la retina durante el peeling macular.

ALTA INYECTABILIDAD **DOUBLE LUTEIN BLUE™** puede ser inyectado fácilmente, incluso con cánulas de 27G, **evitar cánulas con punta de silicona.**

ANTES DE SU USO



Crear espacio dentro de la jeringa, empujando el émbolo hacia atras.

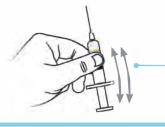

Agitar enérgicamente durante 5 segundos inmediatamente antes de la inyección.





Distribuidor España y Portugal

28850 Madrid / España

Tel. +34 91 676 47 97 email: avi@avisl.es

www.mediconturavi.es